



Disposable SINMED Sterile Ophthalmic Drape

Disposable SINMED Sterile Ophthalmic Drape terbuat dari material nonwoven dengan kantong menampung cairan yang menempel. tersedia dalam layer single dan double layer dalam berbagai ukuran yaitu 100 x80 cm.

Digunakan untuk menutupi dan melindungi pasien saat tindakan pembedahan mata. terbuat dari bahan yang menyerap cairan pada satu sisi dan tahan cairan pada sisi pasien, untuk perlindungan yang maksimal.

ISO 13485

Penggunaan Disposable SINMED Sterile Ophthalmic Drape

1. Buka kemasan kantung steril
2. Gunakan sarung tangan sebelum menggunakan produk
3. Posisikan Drape pada area tengah mata
4. Buka Release Paper
5. Letakan Drape pada area mata
6. Buka lipatan kesisi lateral mata
7. Gunakan single pouch untuk menempatkan cairan yang keluar dari mata pasien
8. Drape yang telah digunakan harus dimasukan kedalam kantung plastik biohazard untuk dimusnahkan



Material: Nonwoven
Ukuran: 100cm x 80cm



STERILE EO



Sterile unless the packaging is damaged or opened.
Avoid contact with potential ignition sources

Didistribusikan Oleh:

